



電動+手動 讓媽媽一機 2用


酷咕鴨兩用吸乳器使用說明書 KU.KU Duckbill dual usage breast pump Instruction

KU-9012

專利產品 請勿仿冒
PATENTED PRODUCT

為了您的安全，請您務必花費幾分鐘的時間，在充分了解本說明書之後，按照內容作正確的使用。
In order to protect your safety, please spend some times to read thought this instruction and operate the device with the direction before use.

◎ 電動組裝說明

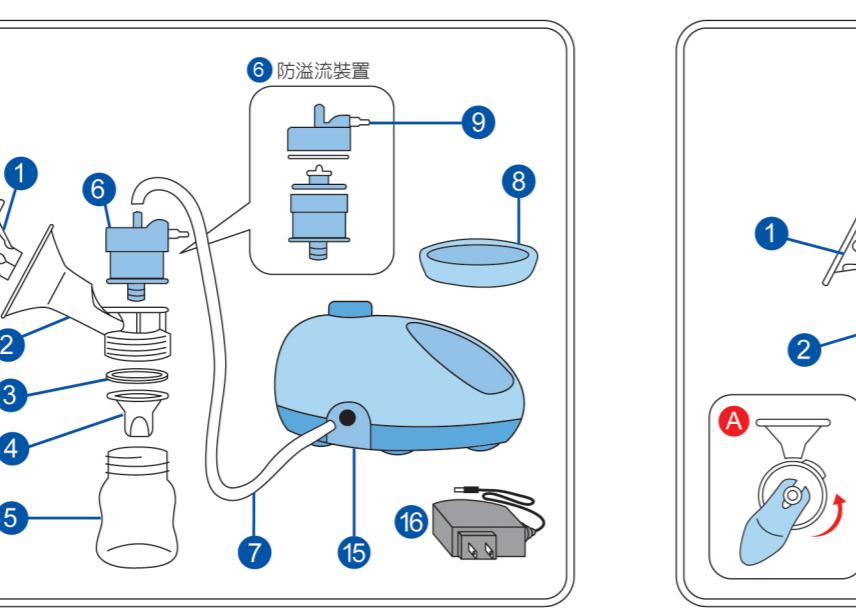

- 將吸乳罩墊片 ① 置入吸乳罩 ② 中，使其貼合。
- 將防溢流裝置 ⑥ 裝於吸乳罩上並確實壓緊。
- 於奶瓶口放上防逆流矽膠管 ④ 以及奶瓶墊圈 ③，將奶瓶與吸乳罩轉緊。
- 將矽膠管 ⑦ 分別裝於防溢流裝置上方以及主機後方出風口。
- 洩氣閥 ⑨ 請勿遺失，否則將會洩氣而無吸力功能。
- 將奶瓶固定環 ⑧ 裝於主機體的奶瓶凹槽中。
- 將組裝好之吸乳器放置於凹槽中固定即可。

◎ 材質說明

品名	數量	材質
① 吸乳罩墊片	1個	矽膠 120°C~20°C
② 吸乳罩	1個	PP 110°C~20°C
③ 奶瓶墊圈	1個	矽膠 120°C~20°C
④ 防逆流矽膠管	1個	矽膠 120°C~20°C
⑤ 奶瓶	1個	PP 110°C~20°C
⑥ 防溢流裝置	1組	PP 110°C~20°C
⑦ 矽膠連接管	1個	矽膠 120°C~20°C
⑧ 奶瓶固定環	1個	矽膠 120°C~20°C
⑨ 洩氣閥	3個	矽膠 120°C~20°C

◎ 手動組裝說明




- 將吸乳罩墊片 ① 置入吸乳罩 ② 中，使其貼合。
- 將吸力環 ⑫ 由下往上裝入矽膠環座 ⑪ 中。
- 將手動專用環座 ⑬ 裝於吸乳罩上，並以旋轉方式將卡榫與吸乳罩結合 A。
- 將組合好之吸力環座裝於手動專用環座上。
- 請將手動專用把手 ⑭ 前端卡在吸力環上，再將把手固定於專用環座上並蓋上手動專用蓋 ⑯。
- 於奶瓶口放上防逆流矽膠管 ④ 以及奶瓶墊圈 ③，將奶瓶與吸乳罩轉緊。

◎ 電池安裝方式

- 外出或室內無插座時，可安裝電池使用吸乳器。
- 將主機體背部電池蓋推脫。(圖一)
- 使用4顆3號鹼性電池。
- 依照電池正負極位置正確安裝。
- 裝回電池蓋。(圖二)
- 若長期不使用或使用變壓器時，請將電池取出。
- 使用變壓器，請將插頭插入主機右方電源插孔(圖三)，本機限用附贈之變壓器，不可使用其他電源變壓器。

◎ 電動吸乳操作說明

- 將組裝完成之主機與吸乳罩，接上電源供應器(或安裝4顆3號鹼性電池)即可。
- 按壓ON/OFF鍵約2秒，直到POWER燈亮。
- 按壓Mode，選擇設定T1、T2模式
- T1-舒適按摩頻率-吸、放、停循環
- T2-快速強力頻率-吸、停、放循環
- 吸力請先由小到大設定，依照個人體質旋轉調整鈕 ①，設定最佳吸力，
- 按壓Start/Stop即可開始或暫停吸乳。
- 當母乳開始流出後，則放慢按壓速度，握把約按壓一半即可放鬆，直至乳汁流出。
- 當持續吸乳時可切換T1-T2模式與調整吸力大小。
- 吸乳完成後，請按壓電源開關ON/OFF鍵，關閉電源。

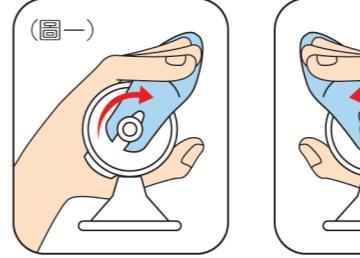

◎ 儲乳瓶使用說明

● 本機限用鹼性電池。

- 當完成吸乳後，取下集乳瓶。
- 將儲乳墊片置於奶瓶口，蓋上奶瓶中蓋，即可當儲乳瓶使用。(圖一)
- 若要當奶瓶使用，請先將儲乳墊片取出，再將奶嘴與奶瓶中上蓋順時針裝上，即可使用奶瓶餵奶。(圖二)



(圖一) (圖二)

- 儲乳瓶功能是將多餘母乳儲存於冰箱冷藏(24小時內使用)，需要時以熱水隔水加熱方式溫熱，即可餵食寶寶(餵奶前請先測試溫度，再行餵奶動作)
- 建議搭配酷咕鴨儲乳瓶使用，更能穩固的固定於機體免於傾倒的危險，也可方便儲存免於母乳的浪費。

◎ 配件使用說明


A 洩氣閥

- 若在媽媽吸乳過程中，感覺吸力過大時，可手動刺開洩氣閥切口，即可釋放壓力。
- 請勿將洩氣閥拔出，以免無法產生吸力。



B 奶瓶固定環

- 將固定環置於機體的奶瓶放置處，再將奶瓶置於上方，並下壓直至不易傾倒即可。
- 酷咕鴨兩用吸乳器所搭配的奶瓶口徑，於市面上一般標準奶瓶皆可適用。
- 若要更換更大容量奶瓶，請將固定環取出，即可適用於其他奶瓶。
- 勿放於強光直接照射處，以免產品受損。
- 拆卸或組裝時請務必按照組裝順序將每個零件組裝完成，拆卸清洗時請小心較小零件，避免遺失造成無法組裝。

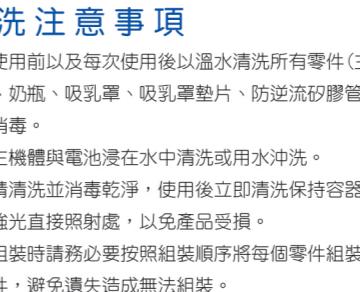

酷咕鴨兩用吸乳器【售後服務保證卡】

- 本公司銷售之吸乳器出廠前經嚴格品管。在正確使用及保養下應能正確地表現其優越性能，本產品從購買日期開始，享有一年內免費維修之售後服務。
- 本保證卡如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存。
- 本保證卡所提供之售後服務，不適用下列情況：a. 使用不當或不慎摔落、泡水，潮濕所造成之故障及損壞。b. 自行拆裝所發生之破損或故障等恕不列入保證範圍。c. 因火災、地震、水災、打雷、以及其他公害、異常電壓等造成故障。
- 為保證顧客之權益，請務必填寫購買日期並加蓋經銷商之店章，否則本公司將以本產品之製造日作為保證期之起算日。
- 未經本公司經銷商蓋章，或塗改購買日期者，一律視為無效。
- 本保固書僅限台灣使用。

購買日期：	
產品貨號：	KU-9012 酷咕鴨兩用吸乳器
姓名：	
電話：	
地址：	
店家：	
店章：	

110V插頭 220V-雙圓插頭 220V-三扁插頭

Jini Baby International Co.,Ltd.
No.27, Lane 290, Sec.2, Jia Dong Road, Chang Hua City 500-84, Taiwan
彰化市茄苳路2段290巷27號 統一編號:12617114 原產地:台灣 Made in Taiwan
www.ku-ku.com.tw TEL : 0800-223358